


COMO CONTROLAR A HEMORRAGIA COM RISCO DE VIDA COM CELOX™ GAUZE


A hemorragia não controlada é responsável por mais de 35% das mortes pré-hospitalares¹



1. Identifique a hemorragia grave

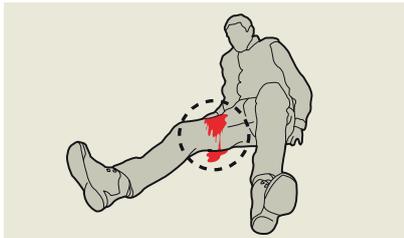

2. Exponha o ferimento - corte ou rasgue a roupa em volta do ferimento

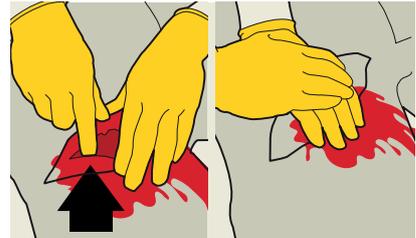

3. Identifique o foco da hemorragia - e aplique pressão direta




4. Limpe o excesso de sangue



5a. Aplique na fonte da hemorragia - ele tem dois entalhes de rasgar, um em cada canto superior




5b. Aplique na fonte da hemorragia - abra a embalagem, pegue uma extremidade da gaze enquanto ainda aplica pressão

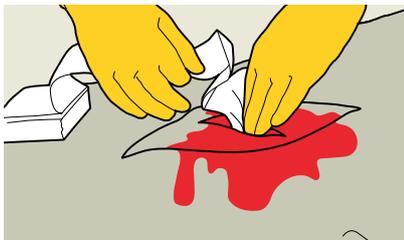


5c. Aplique na fonte da hemorragia - Embale firmemente a gaze Celox que se desdobra diretamente na fonte do sangramento, aplicando a gaze Celox até que a ferida fique cheia acima do nível da pele. O excesso de gaze pode ser cortado ou rasgado



6. Aplique pressão firme por 3 minutos ou até a hemorragia parar

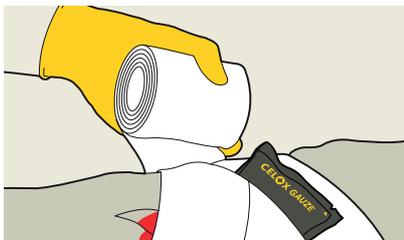

7. Prenda com um curativo para manter a pressão e descarte qualquer gaze Celox restante

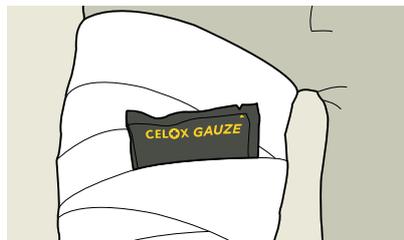

8. Transfira a vítima para a próxima etapa do atendimento

PENSE EM HEMORRAGIA GRAVE

<C> = Hemorragia grave

A = Via aérea

B = Respiração

C = Circulação

D = Incapacidade

E = Exposição

For full details, warnings and removal instructions refer to manufacturer's instructions for use.

1. Kauvar, D.S., Lefering, R., and Wade, C.E. (2006) Impact of hemorrhage on trauma outcome: an overview of epidemiology, clinical presentations, and therapeutic considerations. *J Trauma* 60, S3-11. Copyright © 2018 Medtride Products Ltd. CELOX™ is a trademark of Medtride Products Ltd. All rights reserved.